



B 20 Desinfektionstücher

Gebrauchsfertig



Produktinformation

B 20 Desinfektionstücher sind gebrauchsfertige, alkoholfreie Tücher für die Reinigung und Desinfektion der Oberflächen von medizinischem Inventar sowie in Bereichen, in denen ein hygienisch einwandfreier Zustand notwendig ist gem. EU-Biozidprodukteverordnung (EU-BPR).

- Praktische Desinfektionstücher mit vielfältigen Einsatzzwecken.
- Geprüfte Wirksamkeit mit breitem Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid (behüllte Viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren), begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rotaviren, Adenoviren, Noroviren).
- Geprüft nach den aktuellen VAH-Methoden und europäischen Normen. Begrenzt viruzid gemäß DVV/RKI-Leitlinie.
- Praktische einfache Anwendung und Entnahme aus dem Flowpack.
- Mit wiederverschließbarem Clip.
- Für die schnelle Zwischendurchdesinfektion.
- Tüchergröße: 175 x 250 mm.

ANWENDUNG

Produktart 2: B 20 Desinfektionstücher einzeln entnehmen. Zu desinfizierende Oberflächen und Gegenstände abwischen und Präparat einwirken lassen. Sichtbar kontaminierte Flächen mit B 20 Desinfektionstüchern desinfizieren und Kontamination aufnehmen. Gereinigte Flächen noch einmal desinfizieren. Auf gleichmäßige Benetzung der behandelten Flächen achten. Nach Tuchentnahme Flowpack sofort wieder verschließen. Die Einwirkzeit beträgt gemäß VAH 5 Min. (bakterizid / levurozid). Eine Inaktivierung der Viren erfolgt bei 5 Min. bis 30 Min.

MIKROBIOLOGISCHE WIRKSAMKEIT

| Anwendung | | Einwirkzeit |
|---|------------------------|-------------|
| Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion nach VAH | Bakterizid / Levurozid | 5 min. |

| Wirkungsspektrum | Geprüft gemäß | Einwirkzeit |
|---|------------------------------|-------------|
| Bakterien und Hefen | | |
| Bakterizid / Levurozid | EN 13727, EN 13624, EN 16615 | 5 min. |
| Viren | | |
| Begrenzt viruzid (behüllte viren inkl. HBV, HCV, HIV sowie Coronaviren) | EN 14476 | 5 min. |
| | DVV/RKI-Leitlinie | 15 min. |
| Begrenzt viruzid PLUS (inkl. Rota-, Adeno-, Noroviren) | EN 14476 | 30 min. |

PRÜFUNGEN VON B 20

Geprüft unter hoher Belastung gemäß EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615 sowie DVV/RKI-Leitlinie.

LISTUNGEN VON B 20

VAH-Liste

IHO-Desinfektionsmittelliste

Produktinformation **B 20 Desinfektionstücher**

HINWEISE

Größere Mengen entsprechend behördlichen Vorgaben entsorgen, ggf. der Problemabfallentsorgung zuführen. Bei Oberflächen mit unbekannter Materialzusammensetzung Herstellerangaben beachten bzw. Beständigkeit an verdeckter Stelle prüfen. Es kann zu Abweichungen von Produktfarbe/Geruch kommen, insbesondere bei der Lagerung im Sonnenlicht. Diese Farb- bzw. Geruchsveränderung hat jedoch keinen Einfluss auf die Desinfektionsleistung des Produktes. Gereinigte Verpackungen dem Recycling zuführen. Anwendung ausschließlich durch Fachpersonal.

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

B 20 Desinfektionstücher enthalten B 20. 100 g Wirkstofflösung enthalten 0,26 g Alkyl-benzyl-dimethyl-ammoniumchlorid (CAS-Nr. 68391-01-5), nichtionische Tenside, alkalische Reinigungskomponenten, Komplexbildner sowie Hilfsstoffe und Wasser.

PACKUNGSGRÖßE

4 Flowpacks à 50 Tücher im Karton

ZUBEHÖR

Wandhalter für Desinfektionstücher im Flowpack

HALTBARKEIT

Produkt nach Ablauf des aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr verwenden. Haltbarkeit nach Anbruch: 1 Monat

LAGERUNG

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

ÖKOLOGIE

Die Verpackung ist aus einem Verbundmaterial und thermisch verwertbar. Gebrauchte Tücher über Hausmüll entsorgen. Nicht über das WC entsorgen.

Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

GEFAHRENHINWEISE

B 20 Desinfektionstücher sind nach CLP-Verordnung eingestuft und nicht kennzeichnungspflichtig. Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt.

pH-Wert: 10,4 – 11,4

UNABHÄNGIGES GUTACHTEN - Eigene Untersuchungen

Die Gutachten stehen Ihnen auf Anfrage zur Verfügung.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen (Biozid-Reg-Nr.: B 20 Desinfektionstücher: N-108011).

Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf eingehenden internen und externen wissenschaftlichen Untersuchungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Unsere Haftung hierfür beurteilt sich nach unseren „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“, die bei uns jederzeit angefordert werden können.

Fragen Sie uns nach weiteren Präparaten des oro® Hygienesystems:

Instrumentendesinfektion ▪ Desinfektion von Flächen und Inventar

Desinfektion und Pflege von Händen und Haut ▪ Spezialanwendungen ▪ Zubehör